

## Parche térmico Hokkairo.

### PARCHE TÉRMICO CORPORAL CON ADHESIVO

**Donde sea y cuando sea, HOKKAIRO te mantiene abrigado a ti y a tu familia.**

**HOKKAIRO** es un producto de tecnología japonesa que te entrega calor para tu cuerpo en tu vida diaria o en actividades al aire libre. Es cómodo, portátil, desechable y con adhesivo. Los ingredientes no dañan el medio ambiente.

- ✓ **ACTIVACIÓN RÁPIDA:** comienza a generar calor en algunos minutos.
- ✓ **ACCIÓN PROLONGADA:** brindan calor continuo por 12 horas.
- ✓ El **adhesivo del parche** no deja residuos en tu ropa
- ✓ **Producido con materias primas naturales** como el hierro en polvo, agua, sal, carbón activado y humectantes.
- ✓ El **hierro en polvo**, al entrar en contacto con el aire, se oxida generando **calor de forma natural**.

**⚠ ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE LEER LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTES DE USAR.**

#### INSTRUCCIONES DE USO:

**PASO 1:** retire el producto de su envase.

**PASO 2:** retire el sello del adhesivo.

**PASO 3:** pegue sobre una primera capa de ropa.

\* Para una mayor eficacia se recomienda cubrir con una segunda capa de ropa.

\*\* Se recomienda no usar en ropa que pueda dañarse fácilmente (ropa fina o pieles).

\*\*\* Al retirar el producto, coloque un dedo en el extremo sin el adhesivo y levante suavemente para despegar.

**En cuestión de minutos Hokkairo estará generando calor.**

**Componentes:** Hierro en polvo, agua, vermiculita, carbón activado, sales, resina absorbente de agua.

#### RECOMENDACIONES:

- No usar directamente sobre la piel.
- Verifique la condición de la piel cada una hora.
- Tenga especial cuidado si su piel es sensible.
- Se recomienda no utilizar mientras duermes.
- No usar en combinación con otros dispositivos que generen calor.
- No usar con elementos que apliquen presión al producto (ejemplo: cinturón u otros).
- No lo use dentro de zapatos o calcetines.

- Se requiere supervisión de un adulto cuando el producto es utilizado por niños.
- Se recomienda no usar en personas con movilidad reducida o bebés.
- En casos de padecer diabetes o problemas de circulación sanguínea consulte con su médico antes de usar el producto.
- Si percibe enrojecimiento, picazón o dolor en la piel, detenga inmediatamente su uso y busque asistencia médica.
- **Deje de usarlo inmediatamente si el producto genera una temperatura muy alta.**

**PRECAUCIONES:**



No usar directamente sobre la piel.



Se recomienda no utilizar al momento de dormir.



No presione con un cinturón o similares

**El producto no debe ser ingerido.** En caso de tener contacto de forma accidentalmente con su boca, expulse inmediatamente, enjuague con abundante agua y consulte a su médico.

Dependiendo de las condiciones de uso, el producto puede alcanzar una temperatura máxima de 64° C, su temperatura promedio es de 53°C y en el tiempo de mantenimiento 40°C o más (12 horas). El producto alcanza los 40°C dentro de los primeros 20 minutos desde que se activa. Así como también en un ambiente demasiado frío puede que el producto no alcance las temperaturas antes mencionadas.

La temperatura máxima, la duración y la temperatura promedio que se indican son valores medidos en base a la Ordenanza Metropolitana de Tokio, y pueden variar según las condiciones de uso reales.

**ALMACENAMIENTO:** mantener en un lugar fresco y seco, no exponer a la luz del sol. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Mantener en su envase original.

- ✓ **Producido por laboratorio japonés; alta calidad garantizada. Hecho en Japón.**
- ✓ **Desempeño evaluado bajo Normas Industriales Japonesas (JIS).**

**Hokkairo te entrega calor duradero en forma rápida, en cualquier momento y lugar. Solo necesitas adherirlo sobre una primera capa de tu ropa a la altura de tu abdomen, espalda, cintura o en la zona que tu desees. Comprueba la eficacia de Hokkairo y olvídate del frío.**

**Servicio al cliente: +56 9 3198 3696**

Comercializado por **Inversiones La Esperanza (Chile) Ltda.**

Av. Apoquindo 3472 Of. 1201, Las Condes, Santiago, Chile

Fabricado por **Kowa Company, Ltd.**