

Hokkairo para Calcetines con Adhesivo.

PARCHES TERMICOS PARA CALCETINES CON ADHESIVO

Donde sea y cuando sea, HOKKAIRO te mantiene abrigado a ti y a tu familia.

HOKKAIRO es un producto de tecnología japonesa que te entrega calor para tu cuerpo en tu vida diaria o en actividades al aire libre. Es cómodo, portátil, desechable y con adhesivo. Los ingredientes no dañan el medio ambiente.

- ✓ **ACTIVACION RAPIDA:** comienza a generar calor en algunos minutos.
- ✓ **ACCION PROLONGADA:** brindan calor continuo por 7 horas.
- ✓ El **adhesivo del parche** no deja residuos en sus calcetines.
- ✓ **Producido con materias primas naturales** como el hierro en polvo, agua, sal, carbón activado y humectantes.
- ✓ El **hierro en polvo**, al entrar en contacto con el aire, se oxida generando **calor de forma natural**.

⚠ ADVERTENCIA: ASEGURESE DE LEER LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTES DE USAR.

INSTRUCCIONES DE USO:

PASO 1: retire el producto de su envase.

PASO 2: retire el sello del adhesivo y péguelo en el calcetín.

PASO 3: póngase los zapatos inmediatamente.

En cuestión de minutos Hokkairo estará generando calor.

Componentes: Hierro en polvo, agua, vermiculita, carbón activado, sales, resina absorbente de agua.

RECOMENDACIONES:

- No usar directamente sobre la piel.
- Se recomienda no utilizar mientras duermes.
- No use el producto bajo condiciones donde no pueda retirarlo inmediatamente.
- No use el producto en calzados que permitan que el aire ingrese fácilmente como pantuflas, sandalias, botas de agua o zapatos sueltos.
- Tenga cuidado después de quitarse los zapatos, porque las almohadillas tienden a calentarse si se vuelve a poner los zapatos.
- Verifique la condición de la piel cada una hora.
- Si percibe enrojecimiento, picazón o dolor en la piel, detenga inmediatamente su uso y busque asistencia médica.
- Se requiere supervisión de un adulto cuando el producto es utilizado por niños.
- Se recomienda no usar en personas con movilidad reducida o bebés.
- No usar en combinación con otros dispositivos que generen calor.

- Tenga cuidado con quemaduras cuando se usa con calcetines delgados, como medias o similares.
- Consulte con su médico antes de usar el producto si tiene piel sensible, sensación alterada o mala circulación sanguínea debido a diabetes.
- No use varias unidades en un solo pie.
- Si se pega nuevamente, la fuerza adhesiva disminuirá.
- Al retirar el producto, hágalo cuidadosamente para evitar dañar los calcetines.
- No use el producto durante actividades vigorosas que puedan romperlo.
- **Deje de usarlo inmediatamente si el producto genera una muy alta temperatura.**

PRECAUCIONES:



No usar fuera de los zapatos.



No usar durante actividades vigorosas.



No usar en pantuflas o similares.

El producto no debe ser ingerido. En caso tener contacto de forma accidentalmente con su boca, expulse inmediatamente, enjuague con abundante agua y consulte a su médico.

Dependiendo de las condiciones de uso, el producto puede alcanzar una temperatura máxima de 41° C, su temperatura promedio es de 35°C y en el tiempo de mantenimiento (7 horas). Así como también en un ambiente demasiado frío puede que el producto no alcance las temperaturas antes mencionadas.

La temperatura máxima, la duración y la temperatura promedio que se indican son valores medidos en base a la Ordenanza Metropolitana de Tokio, y pueden variar según las condiciones de uso reales.

ALMACENAMIENTO: mantener en un lugar fresco y seco, no exponer a la luz del sol. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Mantener en su envase original.

- ✓ **Producido por laboratorio japonés; alta calidad garantizada. Hecho en Japón. Desempeño evaluado bajo Normas Industriales Japonesas (JIS).**

Hokkairo te entrega calor duradero en forma rápida, en cualquier momento y lugar. Solo necesitas adherirlos sobre los calcetines. Comprueba la eficacia de Hokkairo y olvídate del frío.

Servicio al cliente: +56 9 3198 3696

Comercializado por **Inversiones La Esperanza (Chile) Ltda.**

Av. Apoquindo 3472 Of. 1201, Las Condes, Santiago, Chile

Fabricado por **Kowa Company, Ltd.**

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN.