

Parche Térmico Hokkairon

Cuando los cólicos menstruales se apoderan de tu día, deja que nuestros Parches Térmicos Hokkairon te brinden el alivio que necesitas. Con la tecnología japonesa más avanzada, nuestros parches ofrecen calor reconfortante de forma cómoda y práctica. Son fáciles de usar, portátiles con un adhesivo que se adhiere fácilmente a tu ropa, brindando hasta 14 horas de calor continuo para aliviar tu malestar. Además, están fabricados con materias primas naturales, cuidando tanto de ti como del entorno.

Forma De Uso.

- Abra la bolsa individual justo antes de usar, retire el sello y péguelo sobre la ropa. (Dependiendo del material de la ropa, puede ser difícil de adherir en ciertos casos. Si se pega nuevamente, la fuerza adhesiva disminuirá.)
- Al retirar el producto, coloque un dedo entremedio del producto en el área sin adhesivo y la ropa, y levante suavemente para despegar.

La temperatura que genera el producto puede variar dependiendo del ambiente donde sea usado.



ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE LEER ANTES DE USAR.

Componentes: Hierro en polvo, agua, vermiculita, carbón activado, sales, resina absorbente de agua.

Fecha de caducidad: Impreso en la parte inferior.

Precauciones De Uso

Cómo prevenir quemaduras por baja temperatura:

Las quemaduras a baja temperatura son un tipo de lesiones con eritemas o ampollas que se producen cuando algo más caliente que la temperatura corporal está en contacto con el cuerpo por un período prolongado, incluso a una temperatura que se siente cálida, y pueden volverse graves sin síntomas subjetivos. Durante el uso verifique la condición de la piel aproximadamente cada una hora, si percibe enrojecimiento, picazón o dolor en la piel detenga su uso inmediatamente y busque asistencia médica.

- No use el producto directamente sobre la piel.
- No presione con un cinturón o similares.
- No use el producto mientras duerme.
- No usarlo en combinación con otros calentadores.





No aplicar directamente sobre la piel.



No presione con un cinturón o similares.



No se puede usar al momento de dormir.



No usar en combinación con otros calentadores.

- Deje de usar el producto inmediatamente si está muy caliente.
- Cuando sea usado por menores de edad o personas con movilidad reducida, úselo bajo supervisión.
- Consulte a su médico antes de utilizar este producto si tiene piel sensible y sensación de calor alterado, o mala circulación sanguínea debido a diabetes.

Precaución De Manejo.

- Deseche después de usar de acuerdo a las normativas locales.
- No lo use en ropa que pueda dañarse fácilmente con un adhesivo (como pieles o artículos con pelos largos) o ropa importante.
- No lo use dentro de zapatos o calcetines.
- Este producto debe ser usado únicamente para el cuerpo humano.
- Este producto no puede ser ingerido. No lo introduzca en la boca.

Forma De Almacenaje.

- Almacenar en un lugar fresco, lejos de la luz directa del sol.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No hacer agujeros en el parche individual.

Estamos comprometidos con entregar la mejor calidad, pero ante la eventualidad de que un producto nuestro estuviese defectuoso, por favor contáctenos indicando la fecha de compra y el nombre de la tienda, y envíenos el producto real con su embalaje original a nuestra oficina.



Comercializado por:

Inversiones La Esperanza (Chile) Ltda.

Av. Apoquindo 3472 Of. 1201,

Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono de contacto: (+56) 9 3198 3696

Servicio al cliente: +56 9 3198 3696

Fabricado por:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho

3-chome, Chuo-ku, Tokio, JAPÓN.

